



# REAL MEDpersonal care



MANUALE D'USO E PROGRAMMI PER L'UTILIZZO TERAPEUTICO

ULTRASUONI - ELETTROSTIMOLAZIONE MAGNETO PLUS - MAGNETO LIGHT



#### Fabbricante:

HSD S.r.I. Strada Acquasalata, 11 - int. 6 - 47899 Serravalle RSM T. (+378) 0549.941496 - F. (+378) 0549.976456

#### Committente e distributore esclusivista:





Tel.: 0422 860181 - fax: 0422 863680 Via Marche,1 - 31045 Motta di lLivenza (TV) e-mail: bio@newfly.info

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, copiata o divulgata con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di NEW FLY Eventuali infrazioni saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalla Legge. Tutti i nomi ed i marchi citati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi fabbricanti.

© 2021 NEW FLY- Edizione Luglio 2021 - Rel. 1.0

#### Gentile Cliente,

ci congratuliamo con Lei per la scelta effettuata. Ha ora a sua disposizione un prodotto dalle grandi prestazioni, costruito secondo le più recenti e severe normative europee, ed in grado di garantire un elevato standard di qualità e di sicurezza. La preghiamo di prestare molta attenzione a questo manuale leggendolo in ogni sua parte al fine di familiarizzare con l'apparecchio.

**NEW FLY** 

Questo documento tecnico descrive le norme per il corretto uso e la manutenzione utente dell'apparecchio. Il rispetto delle norme e delle indicazioni qui riportate consentirà di utilizzarlo nel modo più sicuro possibile. Se dopo la lettura persistono dubbi o incertezze sulle operazioni da svolgere, occorrerà contattare il Rivenditore di fiducia o il Costruttore.

# **SIMBOLOGIA UTILIZZATA**



#### **Attenzione**

Richiama l'attenzione su situazioni o problemi che potrebbero pregiudicare la sicurezza.



# Informazioni

Richiama l'attenzione su importanti situazioni di carattere generale.

# **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

 Direttiva 93/42/CEE, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi medici, recepita con D.Lgs. 24/02/97 n. 46 e sue successive modificazioni.

CEI EN 60601-1 CEI EN 60601-1-2 CEI EN 60601-1-4 CEI EN 60601-2-5 CEI EN 60601-1-11 CEI EN 14971

# **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

La Società HSD S.R.L., con sede legale e operativa in SERRAVALLE (RSM) in Strada Acquasalata, 11 interno 6, dichiara, sotto la propria totale responsabilità, che il dispositivo medico denominato classe di rischio IIA in accordo con la regola 9 dell'allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. (recepito in Italia con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46 e ss.mm.ii).

- è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. come da Fascicolo Tecnico archiviato presso l'Azienda;
- è fabbricato in accordo con il Sistema Qualità che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato V+VII del sopra citato Decreto Legislativo, coma da certificato rilasciato da BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a. -Organismo Notificato n.1370 - Viale Monza, 347 -20126 Milano.
- è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del consiglio dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- il Rappresentante Europeo Autorizzato è la Sig.ra Manuela Corbelli - Via Boccioni, 20 - Morciano di Romagna (RN).

Serravalle (RSM)

II legale Rappresentante Manuela Corbelli

# **INDICE**

INTRODUZIONE	
DESCRIZIONE COMPONENTI	5
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	6
Accessori Opzionali	6
GARANZIA	
INDICAZIONI GENERALI SI SICUREZZA	
CONTROINDICAZIONI	
DESTINAZIONE D'USO E APPLICAZIONI	
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI .	
DATI TECNICI	
IDENTIFICAZIONE	
MESSA IN FUNZIONE	8
Connessione delle testine e dei diffusori di	
trattamento	
Connessione alla rete elettrica	
Modalità d'uso	9
Programmi Terapeutici ed accensione	
dell'apparecchio	
Programmi liberi	
Modalità applicative	
Modalità generali	
Modalità ad immersione	
Indicazioni terapeutiche	
Applicazioni specifiche di salute	
Meccanismo d'azione degli ultrasuoni	
Regole fondamentali da rispettare	
Fine trattamento	
MANUTENZIONE	
Pulizia e disinfezione	
PROGRAMMI TERAP. ULTRASUONI	
PROGRAMMI TERAP. ULTRASUONI	
DOMANDE E RISPOSTE	
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
KISOLUZIONE DEI PROBLEMI	. 24

# INTRODUZIONE

# UNA CLINICA PORTATILE CON TUTTE LE FREQUENZE DELLA SALUTE

Nasce REALMED PERSONAL CARE, il primo dispositivo che unisce tutte le frequenze della medicina naturale, ovvero gli strumenti che danno vita armonicamente alla sinfonia del riequilibrio biologico. Tanti dispositivi in uno solo, attivabili in sinergia.

Fino ad ora nessuno aveva realizzato trattamenti sistemici sull'intero corpo insieme a interventi su parti locali per trarre il massimo beneficio da frequenze e trattamenti convergenti. L'orchestra REALMED PERSONAL CARE è composta dai seguenti strumenti:

- Due canali autonomi di Campi Elettro Magnetici Pulsanti a Bassa e Alta Frequenza, a ognuno si possono eventualmente collegare due materassini trapuntati da circa 800 Gauss;
- Ultrasuoni;
- Raggi Infrarossi;

- EMS elettrostimolazionmi di ultima generazione:
- Tutti gli accessori possibili e personalizzabili

Ad esempio, mentre con un canale dei CEMP si tratta su tutto il corpo l'osteoporosi, l'artrosi, l'artrite, la fibromialgia tramite l'innovativo materassino notturno con potenza fino a 750 gauss (anche per i casi più difficili),

contemporaneamente si può fare un trattamento locale, segnatamente per la psoriasi o l'algodistrofia, con la Bassa frequenza che arriva in profondità e l'Alta frequenza che agisce in superficie. I benefici biologici di un uso combinato delle due gamme di frequenze sono straordinari e di fatto non vengono utilizzati propriamente e contestualmente dall'intero settore.

Inoltre è possibile attivare contemporaneamente un programma di Infrarossi per le aree infiammate e da riequilibrare nella rete linfatica e vascolare, oppure combinare i programmi antalgici dei CEMP con l'uso degli Ultrasuoni, che hanno importanti applicazioni anche in estetica.

Le innovative elettrostimolazioni consentono di attivare un programma integrato con i CEMP di risveglio e potenziamento muscolare, intervenendo direttamente sulle fibre muscolari (EMS) o sulle cellule che donano energia all'intero organismo (i CEMP attivano l'ATP). Una metodologia estremamente efficace e valida per tutti, dagli anziani allettati alle persone di mezza età che desiderano ritardare il processo di invecchiamento biologico, sino ai giovani che debbono recuperare l'usura dell'attività sportiva.


Belli dentro e belli fuori. Sani dentro e sani fuori. REALMED PERSONAL CARE è una clinica della bellezza attraverso il riequilibrio biologico. Nessun altro dispositivo dispone dell'efficacia dei CEMP che risanano il derma in profondità con il riequilibrio capillare e lo smaltimento delle tossine nella matrice extracellulare, insieme alla tonificazione, compattezza, lucentezza del derma in superficie, con rapidi evidenti processi di rigenerazione delle lacerazioni. Rughe, ogni forma di cellulite, occhiaie hanno le ore contate: il trattamento è riscontrabile ad ogni applicazione e migliora in progressione, non è sintomatico. Questo non significa che non invecchieremo: riconosceremo il processo biologico e lo affronteremo con gli strumenti antiaging più efficaci e duraturi. Ogni cellula darà il meglio del nostro programma biologico.

REALMED PERSONAL CARE, dispositivo unico a livello internazionale, nasce dalla collaborazione clinica, scientifica, tecnologica di EST con NEW FLY, con un unico obiettivo: rendere accessibile per primi l'innovazione della ricerca medica rigenerativa, riabilitativa, antiaging a tutte le persone, considerate pazienti e non clienti. Il dispositivo è stato concepito per un utilizzo facile ed ergonomico, pur nella complessità delle prestazioni. L'intero settore dei dispositivi medici ad uso familiare si limita a vendere. tuttavia senza una assistenza clinica e operativa garantita a ciascuno, con indicazioni e protocolli personalizzati, non si ottiene il massimo beneficio clinico. Solo il paziente può valutare l'andamento e i miglioramenti con i diversi trattamenti, e non deve essere abbandonato a sé stesso. Il dialogo costante con il personale qualificato sulla biologia delle frequenze, che opera in supporto anche a tutte le professioni sanitarie, è la formula innovativa di un legame di collaborazione duraturo, con tanta salute per tutti.

# **DESCRIZIONE COMPONENTI**

- 1 DISPLAY per il dialogo con l'operatore.
- **2** Pulsante "**START/STOP**" per l'avvio, la pausa e l'arresto del trattamento Ultrasonico.
- **3** Pulsante "**START/STOP**" per l'avvio, la pausa e l'arresto del trattamento Magneto Light.
- 4 Pulsanti "▲/▼" PROGRAMS per la selezione dei programmi Ultrasuoni (scorrimento uno alla volta).
- 5 Pulsanti "+/-" POWER% per la selezione dei programmi Ultrasuoni (scorrimento 10 alla volta). Quando il programma Ultrasuoni scelto è attivo permettono di "ritoccare" la potenza.
- 6 Pulsanti "▲/▼" PROGRAMS per la selezione dei programmi Magneto (scorrimento uno alla volta).
- 7 Pulsanti "+/-" POWER% per la selezione dei programmi Magneto (scorrimento 10 alla volta). Quando il programma Magneto scelto è attivo permettono di "ritoccare" la potenza.
- **8** Led "**ON**" segnala che l'apparecchio è collegato alla rete elettrica ma non in funzione.
- 9 Led "STOP" segnala che l'apparecchio non è in funzione.

- 10 Led "PAUSE" segnala che l'apparecchio è in funzione ma momentaneamente in pausa.
- **11** Led "ACTIVE" segnala che l'apparecchio è in funzione.
- 12 Connettore delle testine di trattamento magnetico.
- 13 Connettore della testina e del diffusore Magneto Light.
- **14** Connettore dei diffusori del trattamento elettrostimolazione.
- **15** Connettore delle testine e dei diffusori del trattamento ultrasuoni.
- 16 Presa USB (da usare solo per la programmazione).
- 17 Portafusibile con fusibile di riserva per ricambio (tipo: 315mA 250V 5x20 T ritardato).
- 18 Connettore cavo di alimentazione.
- 19 Interruttore generale di accensione.
- **20** Uscite **MAF** (per collegare diffusori HF, stuoie, materassini, cuscini, etc.).

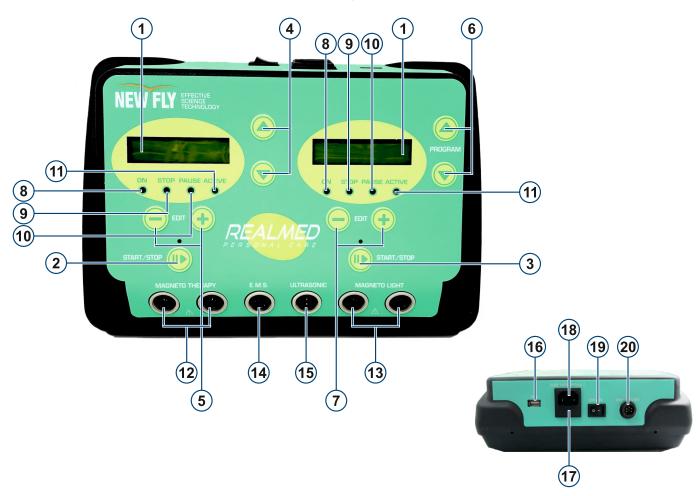

# **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

- Dispositivo 230V 50Hz.
- Cavo Alimentazione
- Manuale d'uso con guida ai trattamenti e certificato di garanzia.
- Borsa per trasporto.
- <u>Accessori opzionali.</u> (variano in base alla composizione della macchina richiesta al momento dell'ordine).



Testina per Ultrasuoni da 40 mm.



Testina per Ultrasuoni da 40 mm. A puntale



Testina per Ultrasuoni da 50 mm.



Fasce elastiche



Testina per Magneto Light



**Diffusore Magneto Light** 



Manipolo per Laser



**Diffusore Laser** 



Solenoide con Laser Light per magnetoterapia alta e bassa frequenza



Fascia Laser Light 120 led infrarosso



Kit da 4 elettrodi rettangolari autoadesivi misure: 45x80 mm.



Kit da 4 elettrodi tondi autoadesivi per viso diametro 32 mm.



Ciabatte conduttive Monipolari



Kit fasce ed elettrodi: 6 fasce elastiche 12 elettrodi in pelle di daino



Cuscino con 2 solenoidi per magnetoterapia



Gel arnica per ultrasuono





Topper in Celliant per magnetoterapia Alta Frequenza



Topper materasso x terapia durante il sonno con 12 solenoidi (imbottitura memory + gel). Il confort generato da questo topper permette di poter fare la terapia durante le ore del sonno unendo l'utile al dilettevole

# **GARANZIA**

Ogni apparecchio è oggetto di accurati controlli e viene collaudato prima di essere messo in vendita. Il consumatore è titolare dei diritti specificati dalla legislazione vigente. La garanzia ha la durata di due anni dalla data di acquisto (fa fede la fattura, lo scontrino o la commissione) ed è estesa a tutte le parti, a eccezione di quelle soggette ad usura. Decade qualora l'apparecchio NEW FLY non venga utilizzato in modo appropriato o manomesso da personale non autorizzato, oppure se il difetto non è segnalato entro due mesi dalla data in cui si é manifestato. Le parti ritenute da NEW FLY difettose all'atto della fabbricazione verranno sostituite gratuitamente.

#### Vita utile

La NEW FLY prevede che la durata del mantenimento delle funzionalità e della sicurezza del dispositivo nelle condizioni d'uso, cura e manutenzione indicata nel Manuale d'uso sia di 6 anni.

I dispositivi sono garantiti, con uso e manutenzione corretta, dalla **NEW FLY** per 12 mesi.

Per la validità dei termini di garanzia è importante che l'apparecchio sia controllato una volta all'anno ed entro la data di scadenza della garanzia stessa. Durante questi controlli (macchina e componenti), saranno aggiornati anche i programmi.



#### **Attenzione**

Entro la scadenza contattare **NEW FLY** per l'aggiornamento dei programmi e il controllo dell'apparecchio/accessori, pena la decadenza della garanzia.

# **INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

Di seguito sono riassunte alcune indicazioni generali di sicurezza:

- leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di procedere alla messa in funzione dell'apparecchio;
- non usare l'apparecchio in presenza di miscele infiammabili con aria o con ossigeno o con protossido di azoto, evitare assolutamente ambienti esplosivi e ambienti umidi o ambienti nei quali siano presenti grandi quantità d'acqua, in quanto l'apparato non è protetto contro l'abbondante penetrazione di liquidi.
- controllare, prima di ogni trattamento, l'integrità del cavo di alimentazione, del cavetto della testina di trattamento e dei connettori;
- per l'alimentazione dell'apparecchio utilizzare esclusivamente il cavetto in dotazione oppure richiederlo alla NEW FLY;
- non effettuare mai alcuna operazione sull'apparecchio con le mani umide o bagnate;
- non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia;
- consultare il paragrafo relativo ai programmi disponibili prima di utilizzare l'apparecchio;
- non appoggiare pesi e in particolare contenitori con liquido sull'apparecchio, non rovesciare liquidi sullo stesso;
- In caso di comportamento anomalo o di malfunzionamento, interrompere il trattamento e spegnere l'apparecchio, non cercare di aprire o di riparare

l'apparecchio. Rivolgersi a NEW FLY per qualsiasi tipo di intervento o controllo.



# RAEE: questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate struttura di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti. I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile

# **CONTROINDICAZIONI**



# L'apparecchio è localmente controindicato:

- nella donna incinta;
- nei portatori di pace-maker cardiaci;
- sulle zone tumorali;

#### L'apparecchio è sconsigliato:

 nel paziente gravemente debilitato e che non è in grado di comunicare.



#### **Attenzione**

In caso di dubbi o perplessità è necessario rivolgersi ad un medico.

# **DESTINAZIONE D'USO E APPLICAZIONI**

Gli ultrasuoni sono utilizzati anche in estetica per gli effetti biologici prodotti:

#### Gli ultrasuoni hanno le sequenti caratteristiche:

Frequenza 1MHz, 3MHz / Potenza: 0,25 - 2,50W / Duty Cycle: 10%-100%.

I campi magnetici pulsanti (CMP) sono utilizzati anche in estetica per le azioni sul collagene, vasodilatazione e per il miglioramento del metabolismo della cute e del connettivo.

#### I CMP hanno le seguenti caratteristiche:

Frequenza 15-100 Hz / Densità di flusso 150 Gauss pp / CMP irradiato: 20-40 Gauss.

La fotocatalisi (Light) si utilizza in estetica per facilitare e velocizzare l'assorbimento dei principi attivi.

La Light è pulsata a Frequenza 15 Hz. Il dispositivo è studiato per poter essere utilizzato in ambienti quali:

Ambulatoriale
 Fisioterapeutico

3. Estetico

4. Domestico

L'uso di tale apparecchio è consentito a personale medico, paramedico e al paziente stesso se opportunatamente informato delle metodologie usate dall'apparato. In caso di dubbi o perplessità è necessario rivolgersi al medico.

# Applicazioni specifiche terapeutiche:

- dolori cervicali di origine artrosica o muscolo tensiva;
- nevralgie cervico branchiali, dolori lombosacrali da artrosi o da disturbi intervertebrali minori.
- lombo-sciatalgia di origine non discale, artrosi delle anche, artrosi delle ginocchia, meniscopatie, dolori articolari di varia natura, artrite reumatoide dei polsi e delle mani, spondilite anchilopoietica, periartrite scapolo omerale, epicondiliti, epitrocleiti, distorsioni muscolari, contusioni, ematomi, algodistrofie riflesse, tenovaginaliti, borsiti, dita a scatto, postumi dolorosi di frattura già saldata, ritardi di consolidazione, achillodinie, algie ischiatiche, apofisi dorsali altiche, coccigodinie, pubalgia, talalgia, metatarsalgia.

# Atter

# Attenzione

Il dispositivo non deve essere usato per:

- 1. elettrodiagnosi;
- 2. uso sperimentale;
- 3. operazioni non permesse negli esempi di impiego riportati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Qualsiasi impiego diverso da quelli descritti o l'utilizzo di prodotti non conformi alle specifiche **NEW FLY** è da ritenersi improprio.

# **CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI**

Fabbricante: HSD S.r.l.

Strada Acquasalata, 11 - int. 6 - 47899 Serravalle RSM T. (+378) 0549.941496 - F. (+378) 0549.976456

### **DATI TECNICI**

Alimentazione elettrica	230VAC
Frequenza alimentazione	50 Hz
Potenza assorbita	50 W
Classe di isolamento elettrico	II
Tipologia delle parti applicate	BF
Grado di protezione	IP21
Frequenza di lavoro Magneto HF (portante)	20 Mhz
Frequenza di lavoro Magneto HF	
Densita' flusso max 7 mW (su carico re	
CMP irradiato 3 mW (su carico re	esitivo da 75 OHM)
Frequenza di lavoro Magneto LF	
Densita' di flusso max	. 150 GAUSS PP
CMP irradiato	20-40 gauss
Frequenza di lavoro fotocatalisi (light)	10-15-20 Hz
Lunghezze d'onda	.420-920 nm/P
Frequenza di lavoro ultrasuoni	1-3 Mhz
Potenza massima di uscita	2,5W
Regolazione di potenza	0÷100%
Frequenza di modulazione	
Tipo di modulazione	
Diametro superfici emittenti ultrasuoni.	
Area emittenti fotocatalisi	
Area emittenti magneto	
Area di radiazione effettiva ultrasuoni <b>6,1</b>	

# Condizioni ambientali ammesse per il funzionamento

TEMPERATURA (T)	+10 ÷ 40 °C
UMIDITA' (Ur)	30 ÷ 75 %
PRESSIONE ATMOSFERICA (mbar)	da 700 a 1060 mbar

# <u>Condizioni ambientali ammesse per il trasporto e l'immagazzinamento</u>

Per il trasporto e l'immagazzinamento dell'apparecchio sono consigliate le seguenti condizioni ambientali:

TEMPERATURA (T)	0 ÷ 40 °C
UMIDITA' (Ur)	25 ÷ 75 %

# **IDENTIFICAZIONE**

Nella parte posteriore dell'apparecchio, sulle testine ad ultrasuoni, magneto light e sui diffusori, sono apposte le targhette identificative con riportati i dati tecnici da comunicare al Centro di Assistenza Autorizzato, al Costruttore o al Rivenditore in caso di richiesta di informazioni o di assistenza tecnica.



# Informazioni

Il danneggiamento, la rimozione o l'alterazione della targhetta identificativa deve essere immediatamente segnalata al Costruttore, al Centro Assistenza Autorizzato o al Rivenditore. Non saranno possibili interventi in garanzia se la targhetta identificativa risulta danneggiata, rimossa o alterata.

#### **LEGENDA:**

- A) Costruttore.
- B) Marcatura CE.
- C) Attenzione, consultare la documentazione allegata.
- D) Effetti fisiologici: temperatura elevata.
- E) Consultare le istruzioni d'uso.
- F) Apparecchio di classe II.
- G) Parte applicata di tipo BF.
- H) Dati tecnici
- I) Modello, N° di serie e anno
- L) Smaltimento rifiuti: trattare separatamente dai rifiuti domestici
- M) Grado di protezione





#### **DIFFUSORE MAGNETO LIGHT**



#### **TESTINA MAGNETO LIGHT**



#### **TESTINA 40 MM**



#### **TESTINA 40 MM A PUNTALE**



# **MESSA IN FUNZIONE**

Estrarre l'apparecchio dall'imballo e collocarlo su un piano rigido orizzontale stabile, adatto a sostenerne il peso, in prossimità di una presa di corrente.

Lo spazio attorno all'apparecchio non deve essere inferiore a 20 cm. su tutti i lati.



# **Attenzione**

E' vietata l'installazione dell'apparecchio:

- in ambienti umidi;
- in prossimità di grandi quantità di acqua;
- vicino a fonti di calore;
- ai raggi diretti del sole.

# CONNESSIONE DELLE TESTINE E DEI DIFFUSORI DI TRATTAMENTO

Inserire il connettore delle testine di trattamento e dei diffusori nelle prese predisposte sul pannello frontale facendo attenzione alla guida di inserimento.

E' vietato l'uso dell'apparecchio in atmosfere che posson

E' vietato l'uso dell'apparecchio in atmosfere che possono contenere gas infiammabili e/o anestetici.



Non collegare e scollegare mai la testina di trattamento quando l'apparecchio è acceso.

#### **CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA**




# **Attenzione**

Non utilizzare spine multiple o riduttori di corrente. Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente testata ed efficiente, dotata di messa a terra. In caso di dubbio non collegare l'apparecchio. Verificare che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al voltaggio ed alla frequenza indicati sulla targhetta dell'apparecchio (un'errata tensione di alimentazione può danneggiarlo senza conseguenze per l'utente)

L'utilizzo dell'apparecchio non correttamente collegato alla rete elettrica può essere pericoloso.

Prima di inserire il cavetto di alimentazione nella presa di corrente assicurarsi che l'interruttore di accensione sia posizionato su "0" (zero).

Inserire il cavetto di alimentazione nell'alloggiamento "18" vicino all'interruttore "19", facendo attenzione che sia inserito bene fino in fondo. Inserire la spina nella presa di corrente.

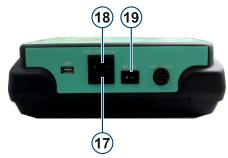



## Attenzione

Per evitare lo strangolamento e il soffocamento con il cavo di alimentazione: montare l'unità ed il cavo di alimentazione lontano dal viso e lontano dalla portata dei bambini.

#### **NOTA:**

Di fianco all'interruttore "19" è presente il porta fusibile "17" con fusibile di riserva (315mA - 250V - 5x20 T - ritardato). Qualora, dopo aver collegato la spina di rete e aver acceso la macchina (interruttore in posizione "I") la macchina non manifesti alcun segno di funzionamento, verificare l'integrità del fusibile procedendo come segue:

- 1. portare l'interruttore nello stato "0"
- 2. scollegare la spina della rete elettrica e la presa di rete della macchina
- 3. utilizzando un giravite a taglio, facendo leva, estrarre il portafusibile e verificare che il fusibile "B" sia integro (il filo conduttore interno non deve essere interrotto). Se è interrotto sostituirlo con il fusibile di ricambio "A" presente all'interno del portafusibile, previa verifica d'integrità.
- 4. riposizionare il portafusibile e riaccendere l'apparato.





#### Attenzione

Alcuni componenti della macchina hanno dimensioni tanto ridotte da poter essere inghiottite dai bambini, conservare quindi l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

## **MODALITÀ D'USO**



L'apparecchio è organizzato in due sezioni (Magneto Plus ed E.M.S a sx e Magneto Light e Ultrasuoni a dx) e può gestire contemporaneamente più accessori.

I due trattamenti possono essere abilitati separatamente agendo sui relativi pulsanti di START/STOP.

Il pulsante di START/STOP della sezione Magneto Plus permette di attivare gli accessori di trattamento (led On e led Active accesi) o metterli in pausa (led On e led Pause lampeggiante).

Per interrompere il trattamento premere per due secondi il pulsante START/STOP.

Il pulsante di START/STOP della sezione Magneto Light permette di attivare gli accessori di trattamento (led On e led Active accesi) o metterli in pausa (led On e led Pause lampeggiante).

Per interrompere il trattamento premere per due secondi il pulsante START/STOP.

# PROGRAMMI TERAPEUTICI ED ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

La macchina la identifica consentendo di scegliere tra uno dei programmi preimpostati come da manuale, in funzione del trattamento prescelto.

Accendere lo strumento posizionando l'interruttore di accensione su "I" si accenderanno i LED ON a certificare il corretto collegamento elettrico. Di seguito sul display comparirà, a scorrimento, la scritta di presentazione:



e a seguire, nella seconda riga, la versione e la data di emissione del sistema operativo: es. "1.00 22 GIU 21". Successivamente comparirà l'invito a scegliere una tipologia di programma; sul display di sinistra comparirà il seguente menù:

-	M	Α	G	N		Р	L	U	S			
+	E	L	Ε	T	T	R	0	T	Ε	R	_	

Premendo il tasto "-" si selezioneranno i programmi Magneto Plus;

Premendo il tasto "+" si selezioneranno i programmi Elettroterapia e sul display a destra comparirà il seguente menù:



Premendo il tasto "-" si selezioneranno i programmi Magneto Light;

Premendo il tasto "+" si selezioneranno i programmi Ultrasuoni.

A questo punto con i tasti programs "▲" e "▼" si selezionerà uno dei programmi, sul display relativo si visualizzerà il numero del programmma terapeutico e il punto di applicazione:

Display Ultrasuoni



#### PATOLOGIA/PUNTO DI APPLICAZIONE

Display Magneto Light



# PATOLOGIA/PUNTO DI APPLICAZIONE

In questa fase i tasti "-" e "+" permettono di tornare al menù di scelta tipologia di programma. Scelto il programma di trattamento premere "START/STOP". In entrambi i casi se si preme START senza aver inserito il manipolo/diffusore la macchina emetterà un "Bip" e sul display comparirà per alcuni secondi la scritta:



oppure:



Premendo il tasto "Start Ultrasuono" si attiva il trattamento ultrasonico e sul display compare la scritta:

# PATOLOGIA DA TRATTARE

D	O	L	0	R	Ε		D	Α	Ε	Р		C	0	N
6	О	1		0	8	0	Р	%		0	7	5	d	С

TEMPO RESIDUO

INTENSITA'

DUTY CYCLE


Durante l'esecuzione "Fase ACTIVE" premendo nuovamente "START/STOP Ultrasuono" si mette in stato di PAUSA il trattamento (il LED Pause lampeggia) oppure mantenendolo premuto per circa 2 sec. si INTERROMPE il trattamento.

I tasti "+" e "-" consentono di aumentare/diminuire la potenza applicata di +/- 20% rispetto al valore preimpostato.

Premendo il tasto "START/STOP Magneto Light" si attiva il trattamento Magneto Light, il led si accende. Un'ulteriore pressione del tasto mette in pausa l'esecuzione del programma ed il led lampeggia.

Mantenendo premuto per circa 2 secondi il tasto "START/STOP Magneto Light" si interrompe il programma di trattamento.

#### PATOLOGIA DA TRATTARE

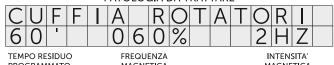

Ogni sezione ha i propri tempi di programma (es. 12 min. Ultrasuoni - 60 min. Magneto Light) e la macchina alla fine di ogni programma emettrà tre "Bip" consecutivi mentre il display visualizzerà la scritta di fine trattamento e l'invito a scegliere un nuovo programma:



rimarrà acceso solo il LED On.

#### **PAUSE**

Per il Trattamento Ultrasonico, la pressione del tasto "START Ultrasonico" fa passare dalla fase ACTIVE alla fase PAUSE, fase in cui è sospeso il trattamento e la testina non emetterà ultrasuoni.

Il tempo non decrementerà. In questa fase i LED Pause e Start lampeggeranno, mentre il Led ACTIVE è spento. Un ulteriore pressione del tasto START riporterà la macchina nella fase ACTIVE.

Per il trattamento Magneto Light, la pressione del tasto "START Magneto Light" sospende il trattamento, il Led ACTIVE si spegne e il diffusore non emetterà più luce né campi magnetici, i LED Pause e Start lampeggiano. Un ulteriore pressione del tasto START riattiverà le funzioni.

#### **STOP**

Sia durante la fase ACTIVE che la fase PAUSE premendo il tasto START Ultrasuono o Magneto Light e mantenendolo premuto per almeno 2 secondi, si TERMINA definitivamente il programma di trattamento.

Il Bip emetterà 3 note ravvicinate, il Led STOP si accenderà ed il display visualizzerà la seguente scritta temporizzata per circa 3 secondi:



Di seguito l'invito a scegliere un nuovo programma e rimarrà acceso solo il LED On.



# Attenzione

Maneggiare con cura le testine del trattamento. Una manipolazione non attenta può influenzare le sue caratteristiche.

Non annodare o attorcigliare il cavo di connessione. Non utilizzare in prossimità dell'apparecchio e delle testine di trattamento, spray, liquidi o solventi.

#### **PROGRAMMI LIBERI**

L'apparecchio è dotato di programmi supplementari modificabili (Liberi), posti in coda ai programmi preimpostati. I parametri modificabili sono:

- DURATA da 001" a 600"
- FREQUENZA BF da 1 Hz a 100 Hz
- POTENZA BF da 10 Gauss a 100 Gauss
- START HF da 500 Hz a 10.000 Hz (il punto di partenza della scansione).
- STOP HF da 500Hz a 10.000 Hz (il punto di arrivo della scansione)
- ATTIVA BF (per attivare o no la sezione BF)
- ATTIVA HF (per attivare o no la sezione HF)

Questi programmi sono ripetibili in 4 fasi.

#### COME PROGRAMMARE I PROGRAMMI LIBERI

Quando sul display compare la scritta:



Tramite le frecce "PROGRAMMI  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ " si seleziona uno dei programmi liberi



Spingendo per 3 secondi il pulsante "START/STOP" si entra nella situazione EDITABILE in cui si possono modificare i parametri a partire dalla DURATA.

Con i pulsanti "+" e "-" si selezionano i parametri da modificare mentre con i pulsanti "PROGRAMS  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ " si cambiano i valori da assegnare ai parametri.

Premere di nuovo EDIT per 3 secondi e si memorizzeranno le impostazioni.

L'applicazione con l'apparecchio è semplice, ma al fine di

## **MODALITÀ APPLICATIVE**

ottenere risultati soddisfacenti è opportuno eseguire le sedute tenendo in considerazione alcune regole fondamentali. Ricordiamo che l'aria attenua gli ultrasuoni, per cui è necessario interporre sempre una certa quantità di gel per ultrasuoni o crema adatta al massaggio, tra la testina di trattamento e la superficie della cute da trattare. La testina di trattamento deve essere applicata in maniera perpendicolare alla zona da trattare e fatta scorrere lentamente, senza troppa pressione raccogliendo di tanto in tanto il gel la crema utilizzata mantenendo sempre un certo strato di gel o crema tra la testina di trattamento e la pelle. Per evitare di surriscaldare la zona di trattamento è necessario spostare la testina con movimento lento e

# **MODALITÀ GENERALI**

La terapia con ultrasuoni può essere somministrata con due modalità diverse: a contatto diretto (tecnica a testina mobile o fissa) e a immersione.

uniforme, facendo attenzione a non lasciarla mai ferma.

Nella prima modalità l'area da trattare va posizionata in modo che sia rilassata, nuda e asciutta. Applicare gel o crema terapeutica.

La modalità a contatto diretto, che è più frequentemente utilizzata, consiste nell'applicazione della testina emittente a diretto contatto della cute con l'interposizione di una sostanza (di solito un apposito gel conduttivo) per favorire da un lato la trasmissione tra testina e cute e dall'altro l'aderenza, lo scivolamento e l'eliminazione di possibile aria frapposta fra cute e trasduttore che potrebbe ostacolare, per la sua capacità riflettente, la trasmissione dell'onda ultrasonica

Nella tecnica a testina mobile, il trasduttore, applicato sull'area da trattare con leggera pressione, viene fatto scorrere con movimenti circolari.

Nella tecnica a testina fissa, quest'ultima viene posta sulla zona da trattare a contatto con la pelle per l'intera durata della terapia con l'interposizione di un gel elettroconduttivo o crema terapeutica. Con questa tecnica si ottengono rapidi aumenti della temperatura in una zona molto circoscritta, mentre il rimanente campo non è riscaldato; è richiesta pertanto una minore potenza di erogazione o una emissione pulsata.

#### **METODICA AD IMMERSIONE**

La parte da trattare viene immersa in un recipiente (preferibilmente in metallo) contenente acqua ad una temperatura di circa 37° insieme alla testina emittente, posta ad una distanza massima di 2-3 cm dalla superficie corporea. Usare solo la testina da 50 mm.



Va evitata in corrispondenza dei globi oculari e dell'utero gravidico per la possibilità che anche a dosaggi terapeutici si verifichi l'effetto della cavitazione.

Particolare cautela va posta nel trattamento di aree in prossimità del midollo spinale dopo intervento di laminectomia

La terapia va evitata in corrispondenza dell'area cardiaca per la possibilità di interferenza sulla conduzione e contrazione cardiaca; è da evitare l'esposizione diretta dei pace-maker o di altre apparecchiature elettromeccaniche impiantate per i possibili danni permanenti che ne possono derivare.



# Attenzione

I parametri definitivi nei programmi di trattamento (tempo, potenza e duty cycle) si intendono applicati nella sola tecnica ed in immersione, dove è specificato. Nella tecnica a testina fissa si devono considerare ridotti del 50%.

### **INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

- Tutte le patologie dell'apparato locomotore in cui si desidera un effetto antalgico.
- Nelle sciatalgie e nevriti in genere (intensità ridotta ed irradiazione lungo la proiezione cutanea del tronco nervoso da trattare).
- Nella periartrite scapolo-omerale la terapia con ultrasuoni è in grado di disgregare le calcificazioni e di favorire il riassorbimento delle deposizioni di sali di calcio.
- Nella epicondilite, nel morbo di Dupuytren.
- È utile per migliorare l'efficacia delle sedute di cinesiterapia.

#### APPLICAZIONI SPECIFICHE DI SALUTE

Gli effetti terapeutici degli ultrasuoni in parte sono dovuti all'aumento della temperatura. Sono rappresentati dall'analgesia dall'effetto fibrolitico e trofico.

#### a) Analgesia

L'effetto analgesico è dovuto all'azione del calore e probabilmente anche ad un'azione diretta degli ultrasuoni sulle terminazioni nervose sensitive.

## b) Azione fibrolitica

Le oscillazioni delle particelle dei tessuti, prodotte dagli ultrasuoni, determinano lo scompaginamento delle fibre collagene dei tessuti fibrosi.

# c) Effetto trofico

La vasodilatazione, che fa seguito all'elevazione termica, facilita la rimozione dei cataboliti e fa pervenire nei tessuti sostanze nutritive ed ossigeno; in tal modo gli ultrasuoni migliorano il trofismo dei tessuti, agevolano la riparazione dei danni tissutali ed accelerano la risoluzione dei processi infiammatori.

#### MECCANISMO D'AZIONE DEGLI ULTRASUONI

Effetti meccanici: l'azione meccanica è dovuta al movimento delle particelle dei tessuti attraversati dall'onda ultrasonica. Sebbene lo spostamento subito dalle singole particelle sia piccolo, le variazioni di pressione che esso produce sono considerevoli e tali da generare importanti effetti meccanici nei tessuti.

Le variazioni pressorie indotte da un apparecchio di ultrasuoni con potenza di 2 W e con frequenza di 800.000 cicli al secondo è pari pressappoco a +/- 2,6 atmosfere. Le modificazioni meccaniche indotte dagli ultrasuoni determinano:

- a] Accelerazione dei processi di diffusione attraverso le membrane cellulari.
- **b**] Scissione di molecole complesse (proteine, polisaccaridi, ecc)
- c] Micromassaggio tissutale.

**Effetti termici**: il passaggio di ultrasuoni attraverso i tessuti "molli" crea un innalzamento della temperatura per:

- assorbimento legato alla viscosità,
- assorbimento dovuto alla conduttività termica
- assorbimento chimico.

Gli ultrasuoni producono calore attraverso le vibrazioni, l'urto e la frizione delle strutture cellulari ed intercellulari che compongono i tessuti, attraversati dalle onde sonore. L'elevazione termica genera, come effetti secondari, aumento del metabolismo cellulare e vasodilatazione.

Effetti chimici: l'azione chimica con modificazione del pH locale e della permeabilità delle membrane cellulari e con cambiamenti molecolari è provocata dalle notevoli forze di accelerazione alle quali le particelle dei tessuti sono sottoposte al passaggio dell'onda ultrasonica.



# Attenzione

Le applicazioni di ultrasuoni non creano alcun danno se non nei casi controindicati (si veda il capitolo "Controindicazioni" sul manuale d'uso). È opportuno comunque attenersi a quanto indicato evitando azioni esasperate o applicazioni troppo frequenti che potrebbero risultare esteticamente controproducenti. Durante l'applicazione, in caso di spiacevoli sensazioni, sospendere il trattamento e consultare un medico.

L'apparecchio può essere utilizzato in ambienti ospedalieri, ambulatoriali o domiciliari.

Si consiglia l'uso delle applicazioni terapeutiche sotto il controllo di un medico.

# **REGOLE FONDAMENTALI DA RISPETTARE**



# Attenzione

- Se fosse necessario effettuare un'interruzione "imprevista", ricordarsi di mettere "SEMPRE" in pausa la macchina, altrimenti la testina LASCIATA IN FUNZIONE, immobile e senza creme, si surriscalda con rischio di danneggiamento;
- prima di procedere nell'applicazione è opportuno identificare la parte del corpo su cui agire. Per i trattamenti anticellulite si consiglia la posizione eretta per una giusta valutazione della zona da trattare, perchè in posizione seduta o sdraiata si ha una sfalsatura della silhouette:
- identificata la zona esatta, selezionare il tipo di programma e l'azione sull'apparecchio;
- le azioni che il programma propone, prevedono tempi di applicazione su piccole aree, quindi per agire su aree più estese occorrerà una quantità di tempo maggiore, dovendo ripetere lo stesso programma più volte a seconda dell'estensione della zona da trattare;
- prima di avviare il programma versare sulla testina di trattamento un'abbondante quantità di gel crema oppure di una crema specifica;
- avviare il programma e appoggiare sulla parte nuda da trattare la testina di trattamento;
- muovere la testina di trattamento in modo lento e circolare, avanti e indietro oppure come per disegnare un otto. A seconda del programma si avvertirà una leggera vibrazione o un leggero calore.

#### **FINE TRATTAMENTO**

A fine trattamento:

- spegnere l'apparecchio portando l'interruttore generale su "0" (zero). Se l'apparecchio rimane acceso, il suo funzionamento non viene compromesso;
- disinserire il manipolo di trattamento dal pannello dell'apparecchio, prendendo il connettore e tirando verso l'alto in maniera perpendicolare, evitando strappi;
- disinserire la spina del cavetto di alimentazione dalla presa di corrente;
- disinserire il cavetto di alimentazione dal retro della macchina tirandolo verso l'esterno con leggerissime oscillazioni verticali;
- pulire la testina di trattamento, evitando di utilizzare solventi o abrasivi, come indicato al capitolo "Manutenzione";
- raccogliere i cavi dei manipoli di trattamento e di alimentazione in maniera ordinata, evitando di annodarli o attorcigliarli;
- riposizionare l'apparecchio e i suoi accessori nella custodia in dotazione;
- conservare in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini, evitando cadute accidentali.



#### Attenzione

Alla fine di ogni trattamento eseguire le operazioni di manutenzione descritte nel capitolo "Manutenzione" indicate con periodicità "A".

# **MANUTENZIONE**



# Informazioni

Per la manutenzione devono essere utilizzati esclusivamente prodotti e ricambi originali.

L'utilizzo improprio di prodotti e ricambi non originali è causa di dedicamento della garanzia.

Le informazioni di questo capitolo sono fornite allo scopo di consentire all'utilizzatore di ottenere le migliori prestazioni dell'apparecchio nelle migliori condizioni di sicurezza.



#### **Attenzione**

Durante la manutenzione dell'apparecchio:

- non effettuare mai alcuna operazione con le mani umide o bagnate;
- non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia, utilizzare un panno imbevuto di detergente neutro non abrasivo;
- non cercare di aprire o di riparare l'apparecchio. Rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato per qualsiasi tipo di intervento o controllo.



# Informazioni

Legenda periodicità:

А	Ad ogni trattamento
М	Mensile
Q	Quindicinale
S.N.	Secondo necessità
2A	Biennale

OPERAZIONE DI MANUTENZIONE	PERIO	DICITA
Verifica dell'integrita' del cavo di alimentazione	М	Q
Verifica dell'integrita' del cavo testina di trattamento	М	Q
Verifica dell'integrita' della testina di trattamento	A	А
Pulizia dell'apparecchio	S.N.	S.N.
Pulizia e disinfezione della testina di trattamento	A	А
Calibrazione periodica	2A	2A
Verifiche elettriche dell'apparecchio	2A	2A
	, ♠	<b></b>
UTILIZZO REGOLARE		



# Attenzione

UTILIZZO FREQUENTE O INTENSO

La manutenzione annuale dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente da **NEW FLY** o da un Centro Assistenza Autorizzato.

#### **PULIZIA E DISINFEZIONE**



#### Attenzione

Prima di ogni azione portare l'interruttore di accensione su "0" (zero) e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Maneggiare con cura la testina di trattamento. Una manipolazione non attenta può influenzare le sue caratteristiche.

#### PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Rimuovere la polvere sull'esterno dell'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito con acqua, oppure con una soluzione acquosa composta dal 75% di acqua e 25% di alcool etilico denaturato.

#### PULIZIA DEI MANIPOLI DI TRATTAMENTO

Scollegare i manipoli di trattamento dall'apparecchio e asportare i residui di crema o gel utilizzando un panno morbido inumidito con acqua, oppure con una soluzione acquosa composta dal 75% di acqua e 25% di alcool etilico denaturato. Dopo la pulizia asciugare bene ed asportare qualsiasi residuo di umidità dai manipoli di trattamento prima della conservazione o del successivo utilizzo.



# Attenzione

E' vietato utilizzare abrasivi o prodotti chimici per la pulizia. Durante la pulizia evitare il contatto tra il connettore e la soluzione detergente utilizzata.

# DISINFEZIONE DEI MANIPOLI DI TRATTAMENTO

Per la disinfezione dei manipoli di trattamento utilizzare un batuffolo di cotone idrofilo o una garza imbevuti leggermente di soluzione antisettica non irritante e alcolica (ad esempio del tipo utilizzato per le piccole abrasioni o escoriazioni, disponibile in farmacia).

Attenzione			APPUNTI:
disinfezione. Durant connettore e la solu	abrasivi o prodotti ch le la disinfezione evit lizione antisettica utili recauzioni di utilizzo luzione antisettica.	are il contatto tra il zzata. Attenersi alle	
CONTROLLO DEL	LA TESTINA DI TR	ATTAMENTO	
e in ogni caso al teri controllare che non potrebbero consent	disinfezione dei mani mine di ogni trattame siano presenti crepe ire l'ingresso di liquio li di trattamento pres rli immediatamente.	ento è necessario o fessurazioni che lo conduttore. Nel	
ACCESSORI	E PARTI DI RI	CAMBIO	
consultare il catalog	di accessori o parti d go accessori, richiede o il <b>sito internet</b> della	ndolo via <b>e-mail</b>	
Attenzione			
ultrasuoni sono appi i dati tecnici da com	re dell'apparecchio e oste le targhe identifi junicare al Centro di ruttore o al Rivendito	cative con riportati Assistenza	
richiesta di accessor	i o parti di ricambio.		
Attenzione	zuoni di ricambio nuò	occoro roporito	
esclusivamente pres	suoni di ricambio può so NEW FLY. L'utilizza a quella indicata può	o di una testina a	
DATA:	AGG. PROGR.	CONTROLLO	

APPUNTI:	
1	6



# PROGRAMMI TERAPEUTICI ULTRASUONI


i Informazioni	PROGRAMMI DISPONIBILI NELLA SEZIONE DESTRA DELLA MACCHINA.
i Informazioni	SELEZIONATO IL PROGRAMMA E' POSSIBILE REGOLARE LA POTENZA PREMENDO IL PULSANTE "+" E "-" . PER AUMENTARE IL TEMPO, RIPETERE IL CICLO

# PROGRAMMI TERAPEUTICI ULTRASUONI

#### **PATOLOGIA**

#### PATOLOGIE DEL LEGAMENTO COLLATERALE MEDIALE ARTROSI FEMOROTIBIALE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	1-1,5 W
EMISSIONE	puls. 50-70%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	02

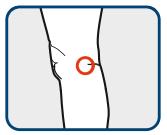

#### **PATOLOGIA**

# BORSITI DELL'ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA - CAPSULITI

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	06



#### **PATOLOGIA**


ARTROSI METACARPALE	
AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	1,5 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	03



#### **PATOLOGIA**


#### CONDROPATIA FEMOROROTULEA ARTROSI

PROGRAMMA	10 minuti
EMISSIONE	continua
POTENZA	1-1,5 W
FREQUENZA	1 MHz

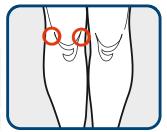

## **PATOLOGIA**


BORSITE RETROACHILLEA	
AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	04

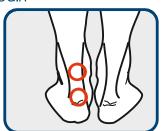

## **PATOLOGIA**

#### DOLORE ALLA REGIONE PARASCAPOLARE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5 - 1 W
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	12

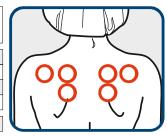

# **PATOLOGIA**

#### BORSITE ZAMPA D'OCA TENDINITE


FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,8-1,2 W
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	05



#### **PATOLOGIA**


#### DOLORE ALLA REGIONE SACROILIACA

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,8-1 W
EMISSIONE	puls. 80-100%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	13

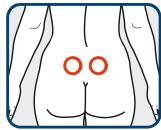

# DOLORE DA COXARTROSI


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	1-1,5 W
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	14

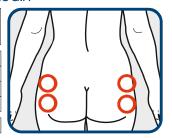

#### **PATOLOGIA**

# DOLORE DA LOMBALGIA


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	1 W
EMISSIONE	puls. 70-90%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	19

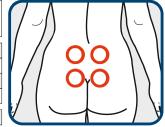

# **PATOLOGIA**

# DOLORE TEMPOROMANDIBOLARE

FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA MAX	11 minuti
PROGRAMMA	15

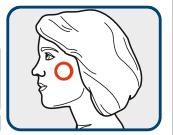

# **PATOLOGIA**


METATARSALGIA	
AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2-2,5 W
EMISSIONE	puls. 50-70%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	20



#### **PATOLOGIA**

# DOLORE DA EPICONDILITE

FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	puls. 80-100%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	16

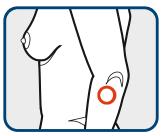

#### **PATOLOGIA**

# MIALGIA DEL TRAPEZIO


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	21



## **PATOLOGIA**

# DOLORE DA EPITROCLEITE

FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	puls. 85%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	17

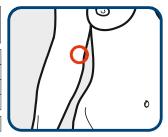

# **PATOLOGIA**

# MIOTENDINITE DELL'AVAMBRACCIO

FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5 - 1 W
EMISSIONE	puls. 70-90%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	22



# **PATOLOGIA**

FASCITE PLANTARE	
AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2-2,5 W
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	18



# **PATOLOGIA**


# MORBO DI DUPUYTREN

FREQUENZA	3 MHz
THEGGETTE	0 1 11 12
POTENZA	0,8-1,2 W
EMISSIONE	pulsata al 50%
27 110010112	p distribution distribution
DURATA MAX	11 minuti
PROGRAMMA	23



# **NEVRALGIA OCCIPITALE**

FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA MAX	11 minuti
DD 0 CD 4 4 4 4 4	
PROGRAMMA	1 24

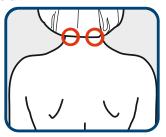

#### **PATOLOGIA**

# PATOLOGIE DEL DELTOIDE-BORSITI


PROGRAMMA	29
DURATA MAX	10 minuti
EMISSIONE	continua
POTENZA	0,5-1 W
FREQUENZA	1 MHz



#### **PATOLOGIA**

# PATOLOGIE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	puls. 80-100%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	25

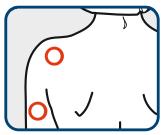

#### **PATOLOGIA**

# PATOLOGIE DEL LEGAMENTO COLLATERALE

PROGRAMMA	10 minuti
EMISSIONE	pulsata al 75%
POTENZA	1-1,5 W
FREQUENZA	1 MHz



#### **PATOLOGIA**

#### PATOLOGIE DELLA CAVIGLIA LATERALE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 W
EMISSIONE	puls. 50-70%
DURATA MAX	11 minuti
DDOCDAMMA	26




AD IMMERSIONE (se presente edema o ematoma in fase acuta e subacuta).

#### **PATOLOGIA**

# PATOLOGIE DEL MUSCOLO TRICIPITE SURALE


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,8-1,2 W
EMISSIONE	puls. 80%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	31

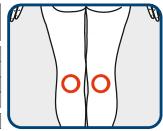

# **PATOLOGIA**

#### PATOLOGIE DEI MUSCOLI FLESSORI


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5 <b>-</b> 1,5 W
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	27

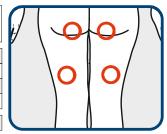

## **PATOLOGIA**

# POLIARTROSI PRIMARIA AD IMMERSIONE


AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	1,5-2 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	32

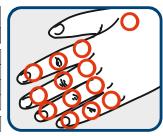

# **PATOLOGIA**

# PATOLOGIE DEL MUSCOLO QUADRICIPITE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,8-1,5 W
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	28

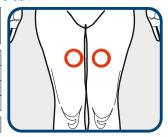

# **PATOLOGIA**

# SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	1,5-2 W
EMISSIONE	puls. 85%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	33



#### TRATTAMENTO PATOLOGIE CON

## **SONOFORESI VEICOLANTE**

DURATA MAX	10 minuti
EMISSIONE	continua
POTENZA	0,5-1 W
FREQUENZA	1 MHz



1 - APPLICARE IL 2 - AGIRE CON IL PRODOTTO SPECIFICO MANIPOLO SULLA SUL CORPO IN SOSTITUZIONE DEL GEL ULTRASUONI

PARTE DEL CORPO DA TRATTARE CON MOVIMENTI CIRCOLARI

#### **PATOLOGIA**

# TENDINITE DEI PERONIERI

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 70%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	39



#### **PATOLOGIA**


TENDINITE ALLUCE VALGO	
AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	35



#### **PATOLOGIA**

# TENDINITE DEL QUADRICIPITE FEMORALE


FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5-1,5 W
EMISSIONE	puls. 50-60%
DURATA MAX	11 minuti
PROGRAMMA	40

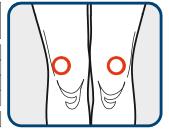

#### **PATOLOGIA**


#### **TENDINITE** DEL RETTO ANTERIORE

FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,8-1 W
EMISSIONE	puls. 40-60%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	36
PROGRAMMA	36

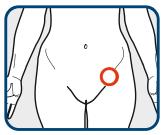

**PATOLOGIA** 


TENDINITE DELL'ACHILLEO	
AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 W
EMISSIONE	puls. 75-100%
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	41

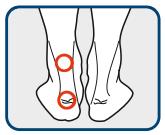

## **PATOLOGIA**

#### **TENDINOPATIA DEL BICIPITE BRACHIALE**

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 90%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	37

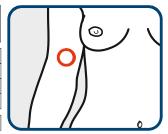

## **PATOLOGIA**


# TENDINITE DEGLI ESTENSORI DELLA MANO

AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2-2,5 W
EMISSIONE	puls. 85%
DURATA MAX	12 minuti
DDOCDAMMA	//2



# **PATOLOGIA**


TENDINITE DI DE QUERVAIN	
AD IMMERSIONE	
FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	38

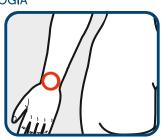

# **PATOLOGIA**

# TENDINITE PROSSIMALE DEL TIBIALE ANTERIORE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5-1,2 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX 10 minuti	
PROGRAMMA	43

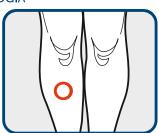

# TENDINITE DEL TRICIPITE BRACHIALE


FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	44



#### **PATOLOGIA**

# TENDINOPATIA DEL POPLITEO


PROGRAMMA	49
DURATA MAX	10 minuti
EMISSIONE	pulsata al 50%
POTENZA	0,5-1 W
FREQUENZA	1 MHz

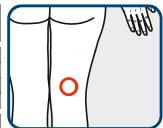

# SE PATOLOGIA CRONICA

### TENDINITE DEL TRICIPITE BRACHIALE


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	45

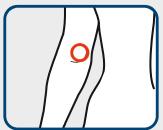

# **PATOLOGIA**

#### TENDINOPATIE DEL BICIPITE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

PROGRAMMA	F0
DURATA MAX	12 minuti
EMISSIONE	continua
POTENZA	0,5-1 W
FREQUENZA	1 MHz

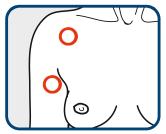

# PER IL TRATTAMENTO AD IMMERSIONE

#### TENDINITE DEL TRICIPITE BRACHIALE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2-2,5 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	46



# TRATTAMENTO PATOLOGIE CON

#### V-SONO PLUS TRATTAMENTO FORTE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2,5 W
EMISSIONE	continua
DURATA MAX	12 minuti
PROGRAMMA	110

Il programma consente anche di verificare il corretto funzionamento del manipolo di trattamento. Se si hanno in dotazione altri accessori opzionali, con questo programma si può controllare il loro corretto

funzionamento.

# **PATOLOGIA**

#### TENDINITE ROTULEA


FREQUENZA	3 MHz
POTENZA	0,8-1,2 W
EMISSIONE	puls. 50-70%
DURATA MAX	10 minuti
PROGRAMMA	47



# **PATOLOGIA**

# TENDINOPATIA DEL BICIPITE FEMORALE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5-1 W
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA MAX 12 minut	
PROGRAMMA	48

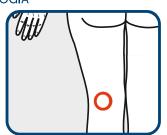



# PROGRAMMI TERAPEUTICI ELETTROSTIMOLAZIONE

i Informazioni	PROGRAMMI DISPONIBILI NELLA SEZIONE SINISTRA DELLA MACCHINA.
i Informazioni	SELEZIONATO IL PROGRAMMA E' POSSIBILE REGOLARE LA POTENZA PREMENDO IL PULSANTE "+" E "-" . LA MACCHINA PARTE SEMPRE DA "O" (zero) LA POTENZA DEVE ESSERE IMPOSTATA OGNI VOLTA. IL TEMPO E' GIA' IMPOSTATO, SE SI VUOLE AUMENTARE IL TEMPO DI UTILIZZO, RIPETERE IL CICLO.

# PROGRAMMI TERAPEUTICI ELETTROSTIMOLAZIONE

# USO DEGLI ACCESSORI PER TRATTAMENTI ELETTROSTIMOLAZIONE OPZIONALI

KIT DA 4 ELETTRODI RETTANGOLARI AUTOADESIVI MISURE: 45x80 MM.



KIT DA 4 ELETTRODI TONDI AUTOADESIVI PER VISO DIAMETRO 32 MM.



CIABATTE CONDUTTIVE MONOPOLARI



KIT FASCE ED ELETTRODI: 6 FASCE ELASTICHE 12 ELETTRODI IN PELLE DI DAINO




BRACCIA

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	01




MANO

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	03

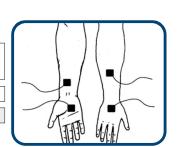


**AVAMBRACCIO** 

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	02

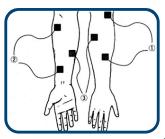

CI	1	ITI	ΞI

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	0.4
PRUCIRAMMA	II U4

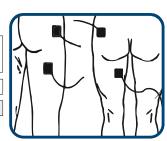


# COSCIA INTERNA

DURATA	20 minuti




# **COSCIA ESTERNA**

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	06

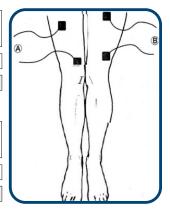

# SCHIENA

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	11

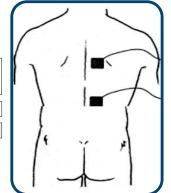


# POLPACCIO ALTO

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	07




DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	08

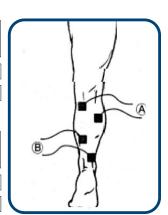


# ADDOMINALI

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	12

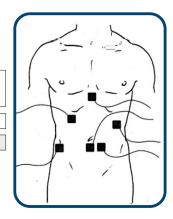

# PIEDI


DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	09

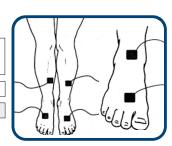

# **APPUNTI:**

S	PALLE
---	-------

DURATA	20 minuti
PROGRAMMA	10

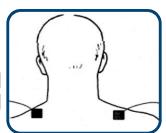

APPUNTI:	
2	6 —



# PROGRAMMI TERAPEUTICI MAGNETO PLUS


i Informazioni	PROGRAMMI DISPONIBILI NELLA SEZIONE SINISTRA DELLA MACCHINA.
i Informazioni	SELEZIONATO IL PROGRAMMA E' POSSIBILE REGOLARE LA POTENZA PREMENDO IL PULSANTE "+" E "-" . METTENDO IL PROGRAMMA IN PAUSA E' POSSIBILE IMPOSTARE IL TEMPO DI LAVORO CON I PULSANTI " ▲ / ▼".

# PROGRAMMI TERAPEUTICI MAGNETO PLUS

# **PATOLOGIA**


# FRATTURE DURATA 60 minuti PROGRAMMA 01 Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato

uso accessorio lettino Total Body

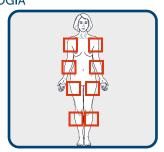

# **PATOLOGIA**


STRAPPI	
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	05

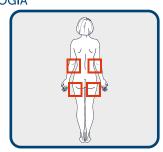

# **PATOLOGIA**


OSTEOPOROSI	
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	02

Consigliato accessorio lettino Total Body

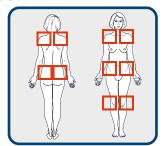



# **PATOLOGIA**

EPICONDILITE	
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	06
PROGRAMMA 06	

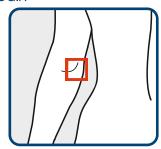


#### **PATOLOGIA**

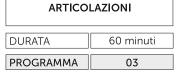

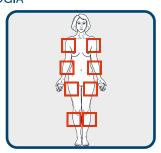


#### **PATOLOGIA**

LOMBOSACRALGIA	
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	07

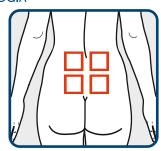

#### **PATOLOGIA**

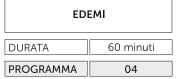




#### PATOLOGIA

ARTRITE	
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	08




# PERIARTRITE

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	09

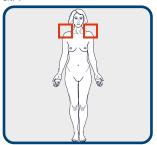

# **PATOLOGIA**

DURATA TEND	INITE 60 minuti
PROGRAMMA	14

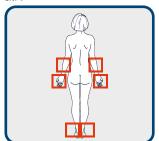


# **PATOLOGIA**


# ARTROSI


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	10

Consigliato accessorio lettino Total Body

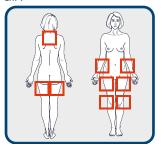

# **PATOLOGIA**

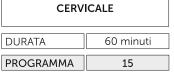


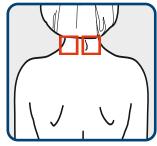

# **PATOLOGIA**

# LUSSAZIONI


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	11

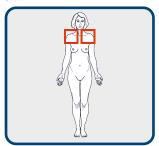

**PATOLOGIA** 

# **CUFFIA ROTATORIA**

	1
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	16

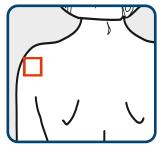


# **PATOLOGIA**

# CONTUSIONI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	12


Applicare solenoide sulle parti da trattare

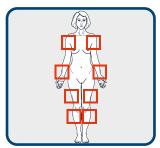

# **PATOLOGIA**

# CARTILAGINE

60 minuti
17

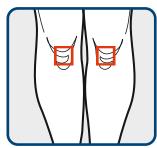


# **PATOLOGIA**

#### CONTRATTURE

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	13

Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

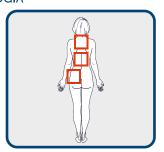

# **PATOLOGIA**

#### TUNNEL CARPALE


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	18



#### INFIAMMAZIONI

DURATA	60 minuti
DD 0 0 D 4 1 4 1 4 4	40
PROGRAMMA	19


Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

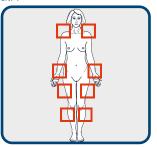

# **PATOLOGIA**

#### TALLONITE


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	29

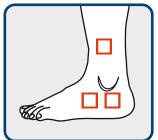

# **PATOLOGIA**

#### **DOLORE COLONNA**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	20

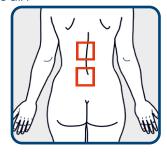


# **PATOLOGIA**

#### STANCHEZZA CRONICA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	31


Consigliato accessorio lettino Total Body

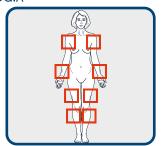

# **PATOLOGIA**

# **DOLORI GINOCCHIA**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	24

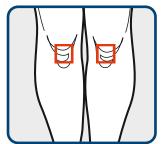


# **PATOLOGIA**

#### FIBROMIALGIA

DURATA	60 minuti
DURATA	J 00 minuti
PROGRAMMA	33

Consigliato accessorio lettino Total Body

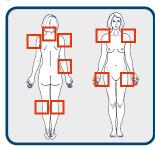


#### **PATOLOGIA**

# **DOLORI ACUTI**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	25


Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

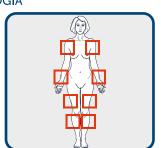

# PATOLOGIA

# ISCHIALGIA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	35

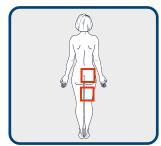


#### **PATOLOGIA**

#### **SPONDILITE ANCHILOSANTE**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	27

Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

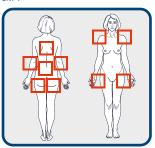


#### **PATOLOGIA**

#### **RECUPERO POST FRATTURA**


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	37

Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

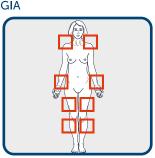

# DOLORI NEUROPATICI


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	38

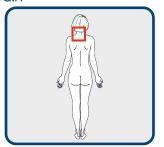

# **PATOLOGIA**

# DOLORI INTERCOSTALI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	43

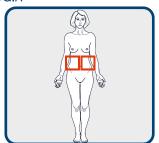


# **PATOLOGIA**

# **CIRCOLAZIONE SANGUIGNA**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	39


Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

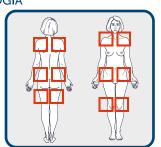

# **PATOLOGIA**

# SACRALGIA


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	45

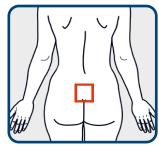

# **PATOLOGIA**

# **DOLORI AL POLSO**


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	40

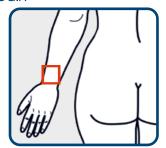

# **PATOLOGIA**

# POLIMIALGIA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	50

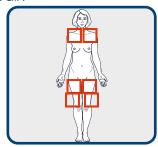

# **PATOLOGIA**

# DOLORI ALLE DITA


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	41



#### **PATOLOGIA**

# CLICK ARTICOLAZIONE A.T.M.


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	53

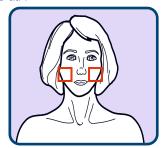

#### **PATOLOGIA**

# DORSALGIA


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	42

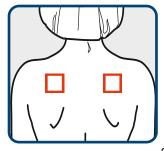

# PATOLOGIA

# NEVRALGIA PUDENDO


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	55

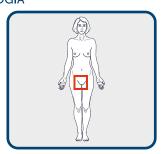

# ATROFIA MUSCOLARE

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	77


Consigliato accessorio lettino Total Body.

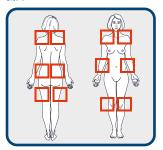

# **PATOLOGIA**

# **TORCICOLLO**


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	83

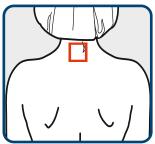

# **PATOLOGIA**

#### **BORSITE**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	78

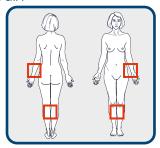


# **PATOLOGIA**

# REUMATISMI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	85

Consigliato accessorio lettino Total Body.

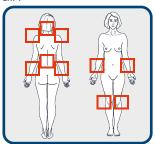


# **PATOLOGIA**

# DISTORSIONI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	79


Applicare solenoide sulle parti da trattare.

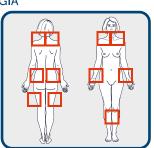

# **APPUNTI:**

# **DOLORI VERTEBRALI**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	80

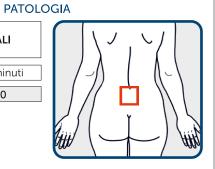


# **PATOLOGIA**

#### **NEVRITE**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	82

Applicare solenoide sulle parti da trattare.

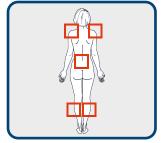




# PROGRAMMI TERAPEUTICI MAGNETO LIGHT

i Informazioni	PROGRAMMI DISPONIBILI NELLA SEZIONE DESTRA DELLA MACCHINA.
i Informazioni	TENENDO PREMUTO IL PULSANTE START/STOP SUI PROGRAMMI LIBERI E' POSSIBILE CREARE UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO (vedi pag.?????)

#### FRATTURE

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	01


Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

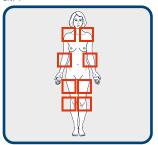

# **PATOLOGIA**

#### LOMBOSACRALGIA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	06

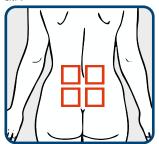


# **PATOLOGIA**


# OSTEOPOROSI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	02

Applicare solenoide sulle parti da trattare.

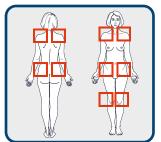

# **PATOLOGIA**

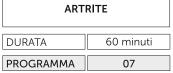




# **PATOLOGIA**

# ARTICOLAZIONI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	03


Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

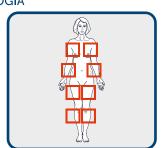

# **PATOLOGIA**

# PERIARTRITE


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	08

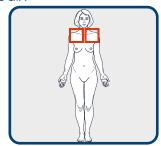

# **PATOLOGIA**

### **STRAPPI**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	04

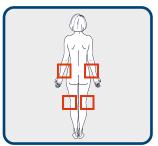


# PATOLOGIA

### ARTROSI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	09


Applicare solenoide sulle parti da trattare.

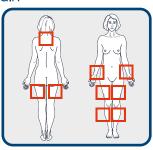

#### **PATOLOGIA**

# **EPICONDILITE**

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	05

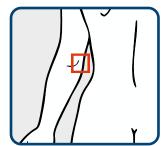

#### **PATOLOGIA**

# LUSSAZIONI


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	10



## CONTUSIONE

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	11

Applicare solenoide sulle parti da trattare.

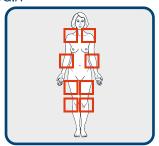

# **PATOLOGIA**

# TUNNEL CARPALE


DUDATA	60 : .:
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	16



# **PATOLOGIA**

TENDINITE
-----------


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	12

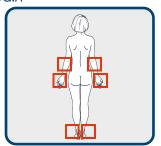

# **PATOLOGIA**

# DOLORE COLONNA


0 minuti
o minuti
17

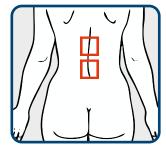

# **PATOLOGIA**

CFRV	F


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	13

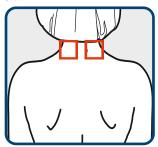

# **PATOLOGIA**

# DOLORI GINOCCHIA


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	18

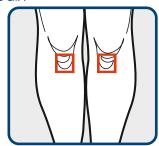

# **PATOLOGIA**

# **CUFFIA ROTATORIA**

D	
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	ll 14

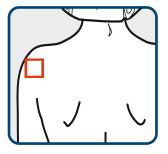


#### **PATOLOGIA**

# DOLORI ACUTI

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	19


Applicare solenoide sulle parti da trattare.

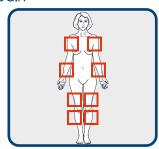

# **PATOLOGIA**

# CARTILAGINE

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	15

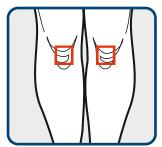


# PATOLOGIA

# SPONDILITE ANCHILOSANTE


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	20

Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

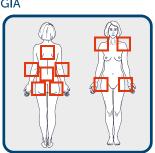

# **ALLUCE VALGO**


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	21

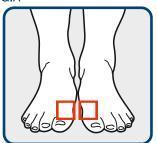

# **PATOLOGIA**

# DOLORI INTERCOSTALI


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	26

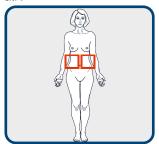

# **PATOLOGIA**

# ISCHIALGIA

DUDATA	60
DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	22

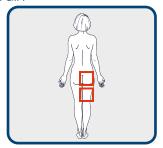


# **PATOLOGIA**

# ARTROPATIA

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	30

Applicare solenoide sulle parti da trattare oppure consigliato uso accessorio lettino Total Body

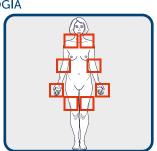

# **PATOLOGIA**

## INSTABILITA' CAVIGLIA CRONICA





# **PATOLOGIA**

# NEUROMA DI MORTON

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	31



# **PATOLOGIA**

# **DOLORE ALLE DITA**


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	24



#### **PATOLOGIA**

# SPINA CALCANEARE


DURATA	60 minuti
DURATA	00 minuti
PROGRAMMA	33

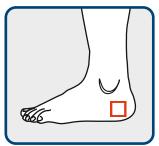

# **PATOLOGIA**

#### DORSALGIA


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	25

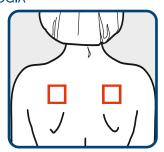

#### **PATOLOGIA**

### **DOLORI VERTEBRALI**


DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	34

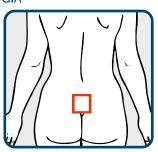

#### **NOTTURNO**

DURATA	600 minuti
PROGRAMMA	35

Posizionare solenoide o utilizzare Total Body secondo indicazioni del Consulente.

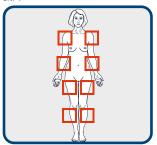


# **PATOLOGIA**

#### PROGRAMMA LIBERO 3 ML

PROGRAMMA 40

Impostare programma, posizionare solenoide e/o utilizzare Total Body secondo indicazioni del Consulente o del medico.

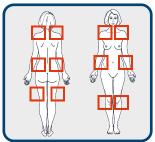


#### **PATOLOGIA**

#### LASER LIGHT

DURATA	15 minuti
PROGRAMMA	36

Posizionare solenoide o utilizzare Total Body secondo indicazioni del Consulente.

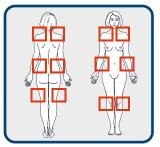


#### **PATOLOGIA**

#### PROGRAMMA LIBERO 4 ML

PROGRAMMA 41

Impostare programma, posizionare solenoide e/o utilizzare Total Body secondo indicazioni del Consulente o del medico.

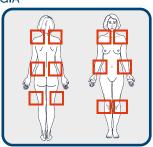


# **PATOLOGIA**

# LIBERO LASER LIGHT

PROGRAMMA	37

Impostare programma, posizionare solenoide e/o utilizzare Total Body secondo indicazioni del Consulente o del medico.

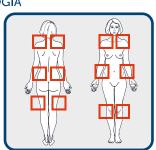


# **APPUNTI:**

#### **PATOLOGIA**

# PROGRAMMA LIBERO 1 ML

DURATA	60 minuti
PROGRAMMA	38

solenoide e/o utilizzare Total Body

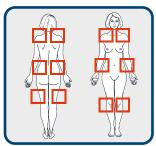

Impostare programma, posizionare secondo indicazioni del Consulente o del medico.




# PROGRAMMA LIBERO 2 ML

OLIDATA	CO 1:

DURATA 60 minuti PROGRAMMA 39

Impostare programma, posizionare solenoide e/o utilizzare Total Body secondo indicazioni del Consulente o del medico.

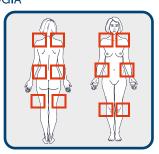

		I	
-	5		
- 6	٦		,

# **DOMANDE E RISPOSTE**



# Informazioni

#### Quando si può usare l'apparecchio?

L'apparecchio si può usare in qualsiasi momento della giornata. Consigliamo di ritagliarsi un momento della giornata, per potersi dedicare esclusivamente al trattamento, senza doversi occupare di qualsiasi altra cosa.

#### In quando tempo si possono ottenere risultati?

Dipende; nella maggior parte dei casi, anche dalle prime applicazioni. Si deve comunque considerare che la reattività dell'individuo è soggettiva e varia da persona a persona. Si consiglia di non desistere dalle applicazioni e di prevedere una blanda e continuativa attività fisica ed una alimentazione adeguata, escludendo diete drastiche.

#### Se usati spesso gli ultrasuoni possono recare danno?

Le applicazioni di ultrasuoni non creano alcun danno se non nei casi controindicati (vedere il capitolo "Controindicazioni"). E' opportuno comunque attenersi a quanto indicato evitando azioni esasperate o applicazioni troppo frequenti che potrebbero risultare controproducenti.

#### Se si aumenta la potenza si ottengono più risultati?

**NO!** L'apparecchio è dotato di programmi specifici che prevedono già il livello ottimale di potenza da utilizzare.

#### Se durante il trattamento non si avverte nulla o non si percepisce una continua e leggera vibrazione, cosa significa?

Significa che la zona in questione è meno sensibile, ma ciò non vuol dire che l'onda selettiva ultrasonora non stia esplicando la sua funzione.

#### Quando si può utilizzare il programma di mantenimento?

Si consiglia di utilizzare il programma di mantenimento alternandolo ad ogni tre applicazioni di trattamento specifico, fino a quando non si otterranno risultati soddisfacenti. In seguito si può utilizzare questo programma ogni volta che lo si desidera.

# Si possono fare più trattamenti sulla stessa zona più volte al giorno?

# Qual'è il tempo massimo di utilizzo giornaliero consigliato?

Si consiglia l'utilizzo giornaliero di una durata massima di 12 minuti per ogni zona corporea (i programmi con durata 6 minuti si possono ripetere anche 2 volte).

#### Posso tenere ferma la testina di trattamento?

**NO!** Se la testina non viene fatta scorrere, la parte in trattamento potrebbe raggiungere un surriscaldamento, sia fastidioso che di negativo effetto. Quindi è necessario seguire il metodo di applicazione indicato, per eseguire trattamenti sicuri, altrimenti si limiterebbe l'efficacia dell'azione degli ultrasuoni ad un solo punto, mentre è opportuno agire su tutta la zona circostante, riattivando la circolazione su tutta la zona trattata.

# Devo sempre applicare il gel o la crema sulla testina di trattamento e sulla pelle?

**SI!** e in quantità sufficiente per tutta la zona interessata all'applicazione, altrimenti gli ultrasuoni non vengono trasmessi e la testina di trattamento potrebbe scaldarsi troppo e non esplicare il suo estetico effetto e cosa più importante creare fastidio sulla pelle.

# Come faccio a sapere se la testina funziona in modo corretto?

Se avete dubbi sul corretto funzionamento e produzione di ultrasuoni (suoni non udibili dall'orecchio umano) selezionare il programma 110 denominato "V-SONO PLUS TRATTAMENTO FORTE" e lasciare cadere sulla testina qualche goccia di acqua che apparirà in movimento, sembrerà friggere oltre a presentare una lieve evaporazione se inserito il manipolo grande.

Se non accade nulla si veda il capitolo "Risoluzione dei problemi".

# Come posso pulire la testina di trattamento dopo ogni applicazione?

La pulizia della testina di trattamento è estremamente importante e deve essere scrupolosamente eseguita dopo ogni applicazione. I residui di gel o creme fatte seccare possono indurre la nascita di batteri e muffe, oltre a limitare il corretto funzionamento del trasduttore ultrasonico incorporato nella testina. Per la pulizia seguire quanto indicato nel capitolo "Pulizia".

### Se la testina di trattamento presenta delle fessurazioni o il cavetto appare danneggiato, posso utilizzarli comunque?

**NO**, **assolutamente!** Dopo ogni trattamento occorre verificare la testina di trattamento come indidato nel capitolo "Manutenzione".

### Posso fare applicazioni su vene varicose?

**SI!** Se si applicano trattamenti Magneto Light. **NO!** Se il trattamento è ad ultrasuoni. L'ultrasuono è assolutamente controindicato se si hanno gravi problemi circolatori.

Può essere usato, comunque, per trattare altre zone del corpo non direttamente interessate.

Nei casi più gravi è opportuno rivolgersi ad un medico (vedere il capitolo "Controindicazioni".

## Ho un pace-maker, posso usare l'apparecchio?



# Attenzione

**NO!** E' controindicato l'uso di apparecchi elettronici in generale alle persone portatrici di stimolatori cardiaci ed anche in presenza di elettrodi impiantati. E' opportuno consultare un medico (vedere il capitolo "Controindicazioni").

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



# Attenzione

Non è permesso nessun intervento nell'apparecchiatura, poiché oltre a generare possibili situazioni di pericolo, farà decadere la validità della Garanzia.

COSA FARE NEL CASO IN CUI azionando l'interruttore di accensione l'apparecchio non manifesta alcun segno di funzionamento.

Controllare che il cavetto di accensione sia ben inserito nel suo alloggiamento e nella presa di corrente.

Controllare che il cavetto di alimentazione non presenti segni quali:

- rotture o interruzioni
- deterioramento.

Verificare l'integrità del fusibile presente all'interno del portafusibile.



#### **Attenzione**

In caso di rottura o deterioramento del cavetto di alimentazione scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente e provvedere immediatamente alla sua sostituzione.

COSA FARE NEL CASO IN CUI dopo aver azionato l'interruttore di accensione generale l'apparecchio non abilita le funzioni.

- Verificare il collegamento della testina di trattamento.
- Serrare il connettore della testina di trattamento.

Selezionare il programma di TEST N. 110 (V-SONO PLUS TRATTAMENTO FORTE). Azionare il pulsante di START, se non si avverte nessun effetto controllare che il LED "PAUSE" e "STOP" siano spenti e che il LED "ACTIVE" sia acceso.

Se il LED "ACTIVE" è spento, ripetere la procedura di accensione.

Se il LED "ACTIVE" è acceso, verificare l'emissione di ultrasuoni lasciando cadere sulla testina qualche goccia di acqua che apparirà in movimento, sembrerà friggere oltre a presentare una lieve evaporazione se inserito il manipolo grande (come mostrato in foto).



ADDILINITI

L'apparecchio necessita di particolari precauzioni riguardanti la Compatibilità Elettromagnetica e deve essere messo in servizio in conformità con le informazioni contenute nelle seguenti tabelle. Gli apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili possono influenzare il funzionamento dell'apparecchio.

Emissioni			
Prova di emissione	Conformità		
Emissioni RF CISPR11	Gruppo 1	Ambiente elettromagnetico - guida	
Emissioni RF CISPR11	Classe B	L'apparecchio utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna. interferenza negli apparecchi elettronici vicini.	
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A Conformi	L'apparecchio è adatto per l'uso in ambiente domestico e tutti quelli direttamente collegati ad una rete pubblica.	
Emissioni di fluttuazioni 61000-3-3	Conformi	E' possibile usare il dispositivo in tutti gli ambienti, inclusi gli ambienti domestici e tutti quelli direttamente ad un'alimentazione di rete pubblica a bassa tensione che alimenta edifici usati per scopi domestici.	

		Aspetti di immunità	
Il dispositivo è destinato all'uso in ur	n ambiente elettromagnetico specific	ato sotto. Il cliente o l'utilizzato	re del dispositivo dovrebbe assicurare che è utilizzato in tale ambiente
Prova di immunità	Livello di prova EN 60601-1-2	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Scariche elettrostatiche (ESD) EN 61000-4-2	± 6kVcontatto ± 8kVaria	± 6kVcontatto ± 8kVaria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o ceramica. Se i pavimenti fossero coperti con materiali sintetici, la relativa umidità dovrebbe essere sotto al 30%.
Scoppio / transitori veloci EN 61000- 4- 4	± 2kV linee di alimentazione	± 2kV linee di alimentazione	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un ambiente commerciale o ospedaliero tipico.
Sovratensioni EN 61000-4-5	± 1kV modalitàdifferenziale ± 2kVmodalitàcomune	± 1 kV modalità differenziale ± 2kV modalità comune	La qualità dell'alimentazione di retedeve essere quella di un ambiente commerciale o ospedaliero tipico.
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione EN 61000-4-11	<5% Ur (>95% calo in Ur) per 0,5 cicli 40% Ur (60% calo in Ur) per 5 cicli 70% Ur (30% calo in Ur) per 25 cicli <5% Ur (>95% calo in Ur) per 5 secondi	<5% Ur (>95% calo in Ur) per 0,5 cicli 40% Ur (60% calo in Ur) per 5 cicli 70% Ur (30% calo in Ur) per 25 cicli <5% Ur (>95% calo in Ur) per 5 secondi	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un ambiente commerciale o ospedaliero tipico. Se l'utente del dispositivo richiede un funzionamento continuo durante interruzioni di corrente, si raccomanda che il dispositivo sia alimentato da un gruppo di continuità o una batteria.

RF condotta		Gli apparecchi di comunicazione RF portatili e mobili non
IEC 61000-4-6 3 Veff da 150 kHz a 80 Mhz	3 Veff da 150 kHz a 80 Mhz	dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte del dispositivo, compresi i cavi, eccetto quando rispettano e distanze di separazione raccomandate calcolate dall'equazione applicabile alla
RF condotta IEC 61000-4-3  3 V/m da 80 MHz a 2,5 G Hz	3 V/m da 80 MHz a 2,5 G Hz	frequenza del trasmettitore.  Distanze di separazione raccomandate. d = 1,2 √P da 150 kHz a 80 Mhz d = 1,2 √P da 80 MHz a 80 MHz d = 2,3 √P da 800 MHz a 80 MHz Ove Pè la potenza massima nominale di uscita del trasmettitore in  Watt(W) secondo il costruttore del trasmettitore e d la distanza di separazione raccomandata in metri (m).

L'intensità di campo prodotta dai trasmettitori a RF fissi, come determinata in un'indagine elettromagnetica sul sito potrebbe essere minore del livello di conformità di ciascun intervallo di frequenza. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo ((•))

#### DISTANZE DI SEPARAZIONE TRA APPARECCHI DI RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI E L'APPARECCHIO ULTRASUONI

Questo apparecchio è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l'operatore dell'apparecchio possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e l'apparecchio, sotto raccomandato, in relazione allapotenza di uscita massima degli apparecchi a radiocomunicazione.

Potenza in uscita	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m			
nominale massima del trasmettitore	da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM	da 80 MHz a 800 MHz	da 800 MHz a 2,5 GHz	
W	d=1,2√P	d=1,2√P	d=2,3√P	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,33	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza nominale di uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

APPUNTI:	
4	.1 ————————————————————————————————————
·	·

APPUNTI:	
_	
4	2 ————

APPUNTI:	
4	3 —

# **PROGRAMMI TERAPEUTICI**

	PROG.	PAG.		PROG.	PAG.
PROGRAMMI TERAPEUTICI ULTRASUONI:			Contusioni	12	29
Patologie del legamento collaterale			Contratture	13	29
mediale - artrosi femorotibiale	02	18	Tendinite	14	29
Artrosi metacarpale	03	18	Cervicale	15	29
Borsite retroachillea	04	18	Cuffia rotatoria	16	29
Borsite Zampa d'Oca - Tendinite	05	18	Cartilagine	17	29
Borsiti dell'articolazione della spalla-capsuliti	06	18	Tunnel carpale	18	29
Condropatia femororotulea artrosi	11	18	Infiammazioni	19	30 30
Dolore regione parascapolare Dolore regione sacroiliaca	12 13	18 18	Dolore colonna  Dolori ginocchia	20 24	30 30
Dolore da coxartrosi	14	19	Dolori acuti	25	30
Dolore temporomandibolare	15	19	Spondilite anchilosante	27	30
Dolore da epicondilite	16	19	Tallonite	29	30
Dolore da epitrocleite	17	19	Stanchezza cronica	31	30
Fascite plantare	18	19	Fibromialgia	33	30
Dolore da lombalgia	19	19	Ischialgia	35	30
Metatarsalgia	20	19	Recupero post frattura	37	30
Mialgia del trapezio	21	19	Dolori neuropatici	38	31
Miotendinite dell'avambraccio Morbo di Dupuytren	22 23	19 19	Circolazione sanguigna Dolori al polso	39 40	31 31
Nevralgia occipitale	24	20	Dolori alle dita	41	31
Patologie della cuffia dei rotatori	25	20	Dorsalgia	42	31
Patologie della caviglia laterale	26	20	Dolori intercostali	43	31
Patologie dei muscoli flessori	27	20	Sacralgia	45	31
Patologie del muscolo quadricipite	28	20	Polimialgia	50	31
Patologie del deltoide-borsiti	29	20	Click articolazione A.T.M.	53	31
Patologie del legamento collaterale	30	20	Nevralgia pudendo	55	31
Patologie del muscolo tricipite surale	31	20	Atrofia muscolare	77	32
Poliartrosi primaria	32	20	Borsite	78	32
Sindrome del tunnel carpale	33	20	Distorsioni	79	32
Sonoforesi veicolante	34 35	21 21	Dolori vertrebali	80 82	32 32
Tendinite alluce valgo Tendinite del retto anteriore	35 36	21	Nevrite Torcicollo	82 83	32 32
Tendinite del retto antenore  Tendinopatia del bicipite brachiale	37	21	Reumatismi	85	32
Tendinite di De Quervain	38	21	rearradism	03	32
Tendinite dei peronieri	39	21	PROGRAMMI TERAPEUTICI MAGNETO LIGH	T:	
Tendinite del quadricipite femorale	40	21	Fratture	01	34
Tendinite dell'achilleo	41	21	Osteoporosi	02	34
Tendinite degli estensori della mano	42	21	Articolazioni	03	34
Tendinite prossimale del tibiale ant.	43	21	Strappi	04	34
	4/45/46	22	Epicondilite	05	34
Tendinite rotulea	47	22	Lombosacralgia	06 07	34
Tendinopatia del bicipite femorale Tendinopatia del popliteo	48 49	22 22	Artrite   Periartrite	07	34 34
Tendinopatia dei popiiteo  Tendinopatie del bicipite della cuffia dei rotatori	50	22	Artrosi	09	34 34
V-Sono Plus Trattamento forte	110	22	Lussazioni	10	34
Toolio Tao natamento forto	110		Contusione	11	35
TRATTAMENTI TERAPEUTICI ELETTROSTIMOLA	ZIONE:		Tendinite	12	35
Braccia	01	24	Cervicale	13	35
Avambraccio	02	24	Cuffia rotatoria	14	35
Mano	03	24	Cartilagine	15	35
Glutei	04	24	Tunnel carpale	16	35
Coscia interna	05 06	25 25	Dolore colonna	17 18	35 75
Coscia esterna Polpaccio alto	06	25 25	Dolori ginocchia Dolori acuti	18 19	35 35
Polpaccio basso	08	25	Spondilite anchilosante	20	35
Piedi	09	25	Alluce valgo	21	36
Spalle	10	25	Ischialgia	22	36
Schiena	11	25	Instabilità caviglia cronica	23	36
Addominali	12	25	Dolore alle dita	24	36
			Dorsalgia	25	36
PROGRAMMI TERAPEUTICI MAGNETO PLUS:			Dolori intercostali	26	36
Fratture	01	28	Artropatia	30	36
Osteoporosi	02	28	Neuroma di Morton	31	36 76
Articolazioni Edemi	03 04	28 28	Spina calcaneare	33 34	36 36
Edemi Strappi	04 05	28 28	Dolori vertebrali Notturno	34 35	36 37
Epicondilite	06	28	Laser Light	36	37
Lombosacralgia	07	28	Libero laser Light	37	37
Artrite	08	28	Programma libero 1 ML	38	37
Periartrite	09	29	Programma libero 2 ML	39	37
Artrosi	10	29	Programma libero 3 ML	40	37
Lussazioni	11	29	Programma libero 4 ML	41	37